

2838 VAPOR OZONO FRIO CALOR



NOTA IMPORTANTE:
Este equipo cumple con la reglamentación correspondiente
Lea atentamente el siguiente manual
Este aparato debe ser utilizado por personal calificado.

FICHA TECNICA

TENSION NOMINAL	110V
FRECUENCIA	60Hz
POTENCIA	750W (habitual) 450W (Max caliente) 50W (Max para el frio)

INSTRUCCIONES PARA INSTALACION DEL VAPOR

1. Unir dioptrias con acople negro y ajuste con conector metálico y tornillo
2. Ajuste las ruedas a presión en las dioptrias
3. Coloque tubo principal de sostenimiento dentro del acople negro
4. Verifique el equilibrio de las dioptrias y tubo principal, después coloque el vapor
5. Colocar pieza para vapor frio y caliente, así como se observa en la imagen
6. Programación del equipo



FUNCIONES

1. Abre los poros de la piel para una limpieza profunda.
2. Cuando el vapor penetra dentro de los poros de la piel ayuda a suavizar y a limpiar la grasa, los puntos negros y los remanentes de maquillaje y suciedad.
3. El vapor con ozono es altamente efectivo en matar bacterias, manteniendo la piel suave y fuera de células muertas.
4. Ayuda a eliminar toxinas.
5. Activa la circulación sanguínea, estimula el metabolismo celular, ayudando a la disminución de las arrugas.
6. Equipado con pulverizador en frío para ayudar a contraer los poros para hacer que la piel tenga una apariencia más suave y tersa.

2

INSTRUCCIÓN

1. Remueva el container de agua en dirección contraria de las manecillas del reloj, llene el container con agua, hasta la franja límite, tenga en cuenta que tenga el protector de goma en la boquilla del recipiente. Colóquelo nuevamente ajustando el recipiente en dirección de las manecillas del reloj.
2. Conecte el equipo
3. Presione la tecla HOT (vapor) y luego LIGHT, una luz se encenderá y la maquina comenzara a calentar. El vapor saldrá en más o menos 6 minutos. El vapor saldrá por el tubo conductor. Y luego podrá ser activado el ozono. Si necesita vapor frío presione botón COOL.
4. Mientras que se esta trabajando el nivel del agua puede disminuir. En caso de que el nivel del agua llegue a mínimo, cambiar frasco o apague. **NO HACERLO DIRECTAMENTE CON AGUA FRIA** pues abra daños internos. Recuerde apagar y desconectar el equipo. Remueva el container cuando este frío vuelva a llenar hasta el límite.

MANTENIMIENTO

1. Limpie el recipiente del agua y espiral metálico, método: limpie el espiral metálico con vinagre por 5-7 minutos. Limpie el container con agua y jabón.
2. No olvide chequear varias veces el nivel del agua.

PRECAUCIONES

- ❖ NIVEL DE AGUA: Siempre que este encendido el nivel de agua debe estar entre el límite máximo y el límite mínimo.
- ❖ GOTEO FRECUENTE: No sobrecargue de agua. No moje la salida del tubo conductor de agua.

- ❖ SALIDA DE AIRE: Cuando se sucede una salida de aire. Apague le equipo ajuste el recipiente.
- ❖ CONTROL DE DISTANCIA: Durante la operación, recuerde no colocar el vapor directamente sobre la cara hasta que este no salga de manera uniforme. El tubo debe estar a una distancia de 20 a 35 cm.
- ❖ CONTROL DE TIEMPO: Aunque el ozono es muy bueno matando bacterias no se debe usar por tiempos prolongados. El tiempo de aplicación debe estar de acuerdo al tipo de piel.

TIPO DE PIEL	DISTANCIA	DURACION
Piel grasa, disminución de la circulación	20-25 cm	15 minutos
Piel normal y piel mixta	25-30 cm	10 minutos
Piel seca	30-35 cm	5 minutos
Piel sensible	35 cm	5 minutos
Piel con pigmentación	30-35 cm	10 minutos

NOTA

Si el nivel de agua baja del limite mínimo, el equipo se apagará automáticamente. Evitando que el equipo se quemé. La maquina se tardará en prender nuevamente más o menos de 1-3 minutos.

CONTRAINDICACIONES

- ❖ No coloque cosas oleosas o grasosas dentro del container, el agua puede salir en proyectil y quemara a su paciente.
- ❖ No coloque el tubo de salida directamente sobre el cliente
- ❖ No use el equipo en sitios húmedos
- ❖ No lo exponga al sol por tiempos prolongados

